

Мы рады представить на сайте новейшую разработку
японского международного института биотехнологии, не имеющую аналогов!

Фильтры для носа - NoseMask(PitStopper)

nosemask.ru

Фильтр для носа **NoseMask** применяется для защиты:

1. от различных типов пыли.
 - уличной;
 - домашней;
 - частей шерсти животных;
 - строительной;
 - промышленной.
2. от аэрозолей.
3. от пыльцы и спор растений (особенно актуально для аллергиков на различные аллергены, поступающие с воздухом).
4. от микроорганизмов и вирусов.
5. от смога и гари.
6. от табачного дыма.

То есть **NoseMask** защищает организм от вредных примесей, находящихся в воздухе, с чем в повседневной жизни сталкивается человек, подрывая свой иммунитет и здоровье.

Виды назальных фильтров:

1. Фильтры **NoseMask**.

Nose Mask (для "сухого" носа) рекомендуется для защиты от аэро аллергенов: пыльцы, пыли (бытовой, строительной и др.), от шерсти, эпителия и перхоти животных, от грибковых аллергенов (плесень), от гари, смога. Для ношения в повседневной жизни. Промывать 1-2 раза в день.

2. Фильтры **PitStopper**.

Pit Stopper (при насморке) рекомендуется к ношению во время насморка аллергической и инфекционной этиологии, **а также для защиты и профилактики от ОРЗ и ОРВИ/гриппа**. Промывать при контакте с инфекцией не реже 1 раза в час в мыльной воде, затем под водопроводной и отжимать, а при насморке, вызванном аллергией можно промывать в мыльной воде по мере необходимости. Подавляет насморк и при этом фильтрует воздух. Фильтр использовать при профилактике от гриппа не более недели и промывать в мыльной воде.

ПРИ ПОДБОРЕ РАЗМЕРА ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО **Pit Stopper** НА 1 ММ РАСШИРЯЕТСЯ, КОГДА НАПОЛНЯЕТСЯ ВЛАГОЙ! А ФУНКЦИОНИРУЕТ Pit Stopper ВСЕГДА ВО ВЛАЖНОМ СОСТОЯНИИ.

Аллергикам рекомендуется приобретать комплект - оба вида **Nose Mask** и **Pit Stopper**.

Размеры:

NoseMask:

Размер (L) – 8мм (подходит для большинства взрослых людей)

Размер (S) – 4мм (для обладателей небольших узких носов, а так же для детей)

Pit Stopper:

Размер (L) – 6мм (подходит для большинства взрослых людей)

Размер (S) – 4мм (для обладателей небольших узких носов, а так же для детей)

Рекомендуется:

Аллергикам на пыльцу и пыль (поллиноз, сенная лихорадка), для профилактики ОРЗ, гриппа; парикмахерам, мастерам маникюра, медикам, продавцам, мотоциклистам, велосипедистам, строителям-ремонтникам и т.д., вообще, всем кому нужна защита дыхания, но не хочется одевать обычную маску, скрывающую пол лица.

Устройство будет также полезно пациентам, страдающим хроническими заболеваниями дыхательных путей (например, астмой). Регулярно используя респиратор-невидимку можно сократить или избавиться полностью от лекарственных препаратов для профилактики аллергических и инфекционных заболеваний.

Фармакологическое действие

Носовые фильтры неглубоко вставляются в ноздри, блокируя попадание в дыхательные пути аллергенов, болезнетворных вирусов и бактерий, пыли и пыльцы, взвешенных частиц, выхлопных газов, табачного дыма и других загрязнителей воздуха. Надежную фиксацию обеспечивает тончайшая прочная и гибкая прозрачная рамка, располагаемая под носом. Простота дыхания и комфорт гарантированы даже при быстрой ходьбе и беге. Все части устройства выполнены из нетоксичных материалов, фильтр имеет компактный размер и совершенно не заметен для окружающих.

В России влиянию пыли на здоровье уделяется минимум, впрочем как и экологии вообще. Однако множество исследований было проведено в Европе и США. Одно из последних было проведено в интервале 2002 — 2004 в 13 городах Италии. Значение пыли PM10 были в пределах от 26.3 мкг/м³ до 61.1 мкг/м³. Количество смертей вызванных содержанием пыли с концентрациями свыше 20 мкг/м³ составило 8220 в год, или 9% от общего числа смертей (исключая несчастные случаи), для жителей старше 30 лет. В основном это смерть от рака лёгких (742 случая в год), инфаркта (2562), инсульта (329). А так же сердечно сосудистые заболевания и заболевания органов дыхания.

nosemask.ru

Nose mask L / S

Pit Stopper L / S

Название функции



	Задержание частиц от 100 нм пыльца,пыль,аэрозоли	Тоже +бактерии,вирусы, предотвращение оттока выделений при насморке. Подавляет насморк.
Цель	FFP3 – самая высокая степень защиты от аэроаллергенов (99%)	FFP3 – самая высокая степень защиты от аэроаллергенов (99%) + FFP2 – средняя степень защиты от вирусов (до 90%)
Симптом	Раздвигает носовые ходы, облегчая дыхание.	Раздвигает носовые ходы, облегчая дыхание.
Воздухопроницаемость/ Водопоглощение	При нормальном состоянии 100%	При заложенности и насморке 25,6%
Способ использования	Устанавливается непосредственно. Промывать при необходимости.	Перед тем как одеть смочить водой и хорошо выжать. Промывать в воде периодически.
Ощущения	0 практически нет	мягкое касание
Материал фильтра	Тонкий фильтр (Полиэстер нетканый-материал спанбонд)	Толстый фильтр (Целлюлозная микрогубка)

nosemask.ru

Способ применения:


Новую маску **Pit Stopper** (от насморка) предварительно замочить в воде, затем хорошо отжать, удалив излишнюю влагу, слегка подсушить и аккуратно вставить в нос, отрегулировав положение.



Маски **Nose Mask** не требуют предварительного замачивания.

Поочередно аккуратно вставить оба куполообразных фильтра в носовые полости настолько глубоко, чтобы прозрачная перемычка между двумя фильтрами плотно прилегала к кончику носа, слегка отрегулировать положение маски так, чтобы было комфортно дышать. Первые несколько

минут может возникнуть ощущение напряженности при дыхании, которое затем пропадет и вы вообще забудете о фильтре в носу.

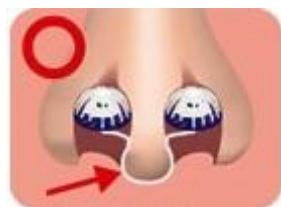

правильно установлен
(перемычка плотно огибает
кончик носа у основания)



неправильно

nosemask.ru

При ношении фильтра желательно меньше разговаривать и стараться дышать носом!

Задняя куполообразная часть маски будет в прямом контакте со слизистой оболочкой носа и нежно соприкасается с ее поверхностью, не вызывая неприятных ощущений.

Маски многоразового использования! После использования Nose Mask (можно носить весь день) вечером промойте маску, высушите и используйте повторно. Pit Stopper промывается регулярно, в зависимости от интенсивности протекающего насморка.

Хранение:

Хранить желательно в собственных закрывающихся пластиковых коробочках-контейнерах. Рекомендуется использовать столько, пока маска не приобретет изношенный вид.

Срок эксплуатации: одной упаковки из 3-ех штук при непрерывном 12-ти часовом ежедневном ношении до 1 месяца.

При профилактике гриппа и ОРВИ рекомендуется промывать в мыльной воде и использовать упаковку максимум неделю.

Состав материала:

Японские носовые маски сделаны из качественных гипоаллергенных экологичных медицинских материалов - фильтрующий материал полиэстер спанбонд (нетканый материал), корпус маски из мягкой резины и полипропиленовой перемычки а в Pit Stopper встроен также специальный плагин, который предотвращает отток жидкости при насморке. Он состоит из ультрапроизводительного адсорбента - целлюлозной микрогубки, которая в 25,6 раз быстрее поглощает влагу, чем обычные материалы и позволяет остановить насморк. При этом не возникает отдышки, так как маска изготовлена из пористого материала с хорошей воздухопроницаемостью.

Каждая маска перед упаковыванием стерилизуется ультрафиолетом и пакуется в герметичную блистерную упаковку!

Меры предосторожности:

С осторожностью применять детям и лицам, имеющим риск носового кровотечения, с искривлением перегородки носа, полипами, астмой. В этих случаях перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Некоторым пользователям необходимо время, чтобы привыкнуть к ощущению фильтра внутри носа - это нормально.

ВНИМАНИЕ: В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.10.1998 N 1222, ред.от 06.02.2002 N 81) фильтры для носа являясь предметом личной гигиены, а также товаром для профилактики и лечения в домашних условиях ОБМЕНУ/ ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖАТ.

nosemask.ru